

**BloodSTOP**<sup>®</sup>  
CONTROLS BLEEDING FAST

*Power to control bleeding  
Power to heal*

# **BloodSTOP**<sup>®</sup> **Wound Care Dressing**

vesilahustuv haavahooldusplaaster

“ **BloodSTOP**<sup>®</sup> loob  
hemostaasi sekunditega ”

- David Ngo, RN  
King Drew Medical Center  
Orange County, CA

Spordiklubid

Koolid

Lasteaiad

Kodune esmaabi

Professionaalne esmaabi

**Kontrollib veritsust.  
Toetab haava  
paranemist.**


**LifeScience PLUS**  
REVOLUTIONARY WOUND CARE

# BloodSTOP®

## STOPS BLEEDING FAST

### BloodSTOP®-i kasutusjuhend


BloodSTOP®-i hemostaatiline haavaside on valmistatud 100% naturaalsest bioühilduvast ja veeslahustuvast eeterdatud naatriumkarboksümetüütselluloosist. BloodSTOP®-i materjal muutub kokkupuutel vere ja eksudaadiga läbipaistvaks geeliks, mis kleepub haavale ja suleb verejooksu.

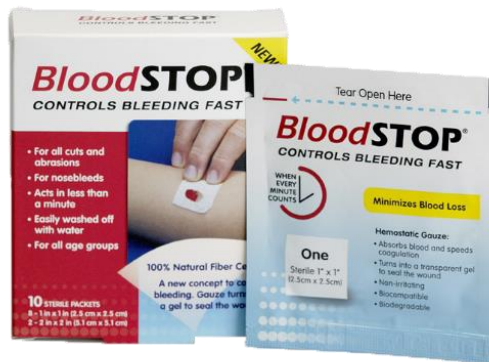

### Kasutusnäidustused

Välispidiseks lühiajaliseks kasutamiseks rebimis- või löikehaavade, abrasioonide või veenipunktsiooni verejooksude ohjamiseks ning haavade hooldamiseks niiske haavakeskkonna vajaduse korral.


Üldpopulatsioonile ja (ainult ELi riikides) patsientidele, kes tarvitavad antikoagulante.

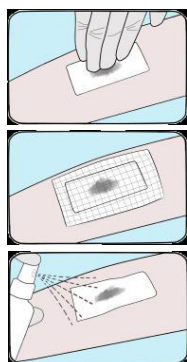

### Juhised käitumiseks pindmise haava korral

1. Kanna puhtale haavale üks või mitu kihti haavasidet kuiva või kinnastatud käega. Suruge haavaside haavale, kuni veritsus täielikult lakkab (tavaliselt 2–3 minutit). Kätele kinni jäämise vältimiseks eemaldage sõrmed kleepuvalt geelilt rulliva liigutusega.
2. Niiske haavakeskkonna säilitamiseks katke piirkond lisahaavasidemega. Verejooksu jätkumisel pöörduge arsti poole.
3. Vahetage iga päev või 24 tunni jooksul. Eemaldamiseks immutage steriilse vee või steriilse füsioloogilise lahusega ja pühkige geel ettevaatlikult ära, vältides hüübe liigutamist. Korra eeltoodud samme, kuni haav paraneb.

### Ninaverejooks

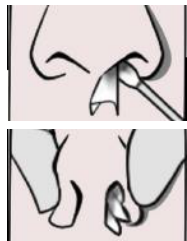

1. Paigaldage õrnalt käsitsi või vatitikuga verejooksu allikale võimalikult lähedale pea kesk- ja tagaosas suunas. Võite haavasideme enne ninna asetamist keerata rulli.
2. Suruge ninasõõrmed ülaosast kokku, kuni verejooks lakkab. Verejooksu jätkumisel pöörduge arsti poole.
3. Eemaldamiseks tõmmake või pigistage geel ninasõõrmetest õrnalt välja. Loputage õrnalt steriilse vee või steriilse füsioloogilise lahusega.

**Hoiatused** Ärge kasutage hammaste väljatõmbamisel. Lõpetage kasutamine, kui tekib turse või punetus. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Katke BloodSTOP® haavaside täiendava sidemega, et säilitada survet haavapiirkonnale. Ärge vahendit korduvalt kasutage kuna see ei ole pärast esimest kasutuskorda enam steriilne. Mittesteriilse vahendi kasutamine võib põhjustada infektsiooni.

**Hoiustamine** Maksimaalse säilivusaja tagamiseks on soovitatav hoida BloodSTOP® haavasidet temperatuuril 15–30 °C (59–86 °F).

**Koostisosad:** puhastatud veeslahustuv eeterdatud naatriumkarboksümetüütselluloos.

Toote nimetus	Mõõtmed	Pakend
BloodSTOP® Hemostat	2,5 x 2,5 cm	8 tk
	5,1 x 5,1 cm	2 tk
	2,5 x 2,5 cm	4 tk
	5,1 x 5,1 cm	1 tk
	2,5 x 2,5 cm	20 tk
	5 x 5 cm	20 tk
	5 x 10 cm	20 tk

Tootja: LifeScience PLUS, Inc., USA, <https://www.lifescienceplus.com/>

Edasimüüja Eestis: NordCare Estonia OÜ, tel: 5058820, [info@sugarmill.eu](mailto:info@sugarmill.eu), [www.sugarmill.eu](http://www.sugarmill.eu)

© 2020 LifeScience PLUS, Inc. Kõik õigused kaitstud. BloodSTOP® on registreeritud kaubamärk. BloodSTOP® ja BloodSTOP® iX on kaitstud Ameerika Ühendriikide patendiga nr 7,262,181.